

N.º 132/CA
Data: 6-12-2004

Assunto: **Risco de infecção através da contaminação de géis condutores e lubrificantes de dispositivos médicos**

Para: Instituições de Saúde e fabricantes destes dispositivos médicos

Contacto no INFARMED: Departamento de Vigilância de Produtos de Saúde

(Tel: 217987145; Fax: 217987155; email: dvps@infarmed.pt)

Ex.mo(a) Senhor(a) Dr.(a),


O INFARMED teve conhecimento através da Health Canada da ocorrência de vários casos de infecções nosocomiais graves associadas à **contaminação de géis condutores usados em ecografia, electrocardiografia, electrocirurgia e desfibrilhação e como lubrificantes de dispositivos médicos (cateteres, endoscópios, instrumentos cirúrgicos, etc.)**.

Assim, o INFARMED recomenda:

- **Utilizar géis condutores e lubrificantes estéreis em** todos os procedimentos invasivos, que envolvam ambiente estéril ou pele não intacta, recém-nascidos, membranas mucosas intactas (esofágica, gástrica, rectal ou vaginal) e em doentes com imunodeficiência ou em terapia imunossupressiva;
- **No caso de utilizar géis condutores e lubrificantes não estéreis**, usar preferencialmente produtos de utilização única ou de multidoses de pequenas dimensões. Para grandes quantidades de gel, os recipientes reutilizáveis devem estar assépticos, devem ser reabastecidos próximo da utilização e não deve ser usado este gel por mais de um mês;
- **No caso de necessidade de aquecimento do gel**, retirar a embalagem do aquecimento logo que possível e secar imediatamente;
- **Armazenar os géis condutores e lubrificantes** em áreas secas e protegidas de potenciais fontes de contaminação como, por exemplo, pó, insectos e roedores.

Mais informação de segurança sobre géis condutores e lubrificantes poderá ser encontrada em http://www.infarmed.pt/pt/vigilancia/prod_saude/inf_seguranca/temas.html

O Conselho de Administração

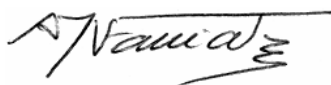

António Faria Vaz