

N.º 006/CA  
Data: 18/01/2006

Assunto: **Erros de conexão de dispositivos através de adaptadores do tipo *luer-lock***

Para: Médicos e Enfermeiros

Contacto no INFARMED: Departamento de Vigilância de Produtos de Saúde  
(Tel: 217987145; Fax: 217987367; email: [dvps@infarmed.pt](mailto:dvps@infarmed.pt))

---

O INFARMED teve conhecimento através da Autoridade Competente dos Estados Unidos (FDA) de vários incidentes graves, incluindo mortes, pelo facto da utilização de adaptadores do tipo *luer-lock* ter permitido associar dispositivos que não os pretendidos.


Os adaptadores do tipo *luer-lock* permitem interligar dispositivos médicos ou associar acessórios ou componentes a um dado dispositivo médico. Dada a sua facilidade de utilização bem como a sua presença em vários tipos de dispositivos ou acessórios, os utilizadores podem utilizá-los para ligação dum dispositivo não pretendido, podendo assim originar incidentes.

Assim, o INFARMED recomenda que:

- Após uma cuidadosa inspeção seja seguida uma sequência apropriada de ligação das tubagens e componentes dos dispositivos de modo a evitar erros;
- Sejam sempre seguidas as recomendações e precauções indicadas pelos fabricantes, particularmente no que respeita à compatibilidade com outros dispositivos;
- Não se modifiquem os dispositivos para administração intravenosa ou de alimentação;
- Os doentes sejam instruídos a pedir auxílio a profissionais qualificados sempre que seja necessário retirar e recolocar as ligações do equipamento;

Todos os incidentes ou quase incidentes relacionados com a utilização de dispositivos médicos devem ser comunicados ao INFARMED. Para tal poderá utilizar o modelo disponível em [www.infarmed.pt/pt/vigilancia/prod\\_saude/profissionais\\_saude/index.html](http://www.infarmed.pt/pt/vigilancia/prod_saude/profissionais_saude/index.html)

**O Conselho de Administração**

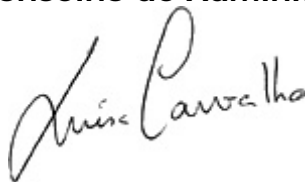

(Dr<sup>a</sup>. Luísa Carvalho)