

N.º005 /CA
Data: 13/01/2006

Assunto: **Incompatibilidade de interruptores de pedal com dispositivos de electrocirurgia de marca diferente**

Para: Médicos e Enfermeiros

Contacto no INFARMED: Departamento de Vigilância de Produtos de Saúde
(Tel: 217987145; Fax: 217987367; email: dvps@infarmed.pt)

O INFARMED foi informado pela Autoridade Competente do Reino Unido (MHRA) da existência no mercado de diferentes marcas de interruptores de pedal que podem ser ligados a dispositivos de electrocirurgia de outras marcas sem que, contudo, devido a diferenças nos circuitos internos, se verifique compatibilidade entre os dois.


Caso se utilize uma destas associações não compatível a selecção de um dado comando não origina o resultado esperado. Por exemplo, numa destas associações verificou-se que na selecção do comando "corte" o dispositivo não respondia e na selecção do comando "coagulação" o dispositivo respondia com "corte".

Assim, o INFARMED recomenda que:

- Apenas sejam utilizadas associações de interruptores de pedal com dispositivos de electrocirurgia com compatibilidade comprovada;
- Sejam sempre seguidas as recomendações e precauções indicadas pelos fabricantes, particularmente no que respeita à compatibilidade com outros dispositivos;

Todos os incidentes ou quase incidentes relacionados com a utilização de dispositivos médicos devem ser comunicados ao INFARMED. Para tal poderá utilizar o modelo disponível em www.infarmed.pt/pt/vigilancia/prod_saude/profissionais_saude/index.html

O Conselho de Administração

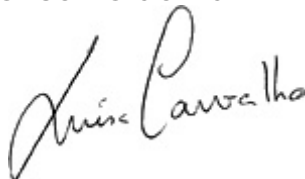

(Dr^a. Luísa Carvalho)