

N.º 055/CD
Data: 24/04/2007

Assunto: **Gruas e assentos para transferência de doentes**

Para: Profissionais de saúde.

Contacto no INFARMED: **Departamento de Vigilância de Produtos de Saúde**

(Tel: 217987145; Fax: 217987367; email: dvps@infarmed.pt)

O INFARMED foi informado, através da Autoridade Competente do Reino Unido (MHRA), da ocorrência de incidentes (quedas) em consequência da má utilização dos dispositivos mencionados, nomeadamente no que se refere a:


- baixa compatibilidade entre as gruas e os assentos de transferência;
- método inadequado de lavagem dos assentos (a qual, se inadequada, pode levar ao rompimento dos referidos assentos);
- manutenção incorrecta das gruas.

Assim, o INFARMED recomenda que:

- todas as gruas e assentos sejam utilizados de acordo com as instruções dos fabricantes;
- só sejam utilizadas combinações gruas-assentos compatíveis e adequadas para o doente em causa (se a condição do doente ou a combinação de equipamento se alterarem, deverá ser efectuada uma reavaliação);
- todas as gruas e assentos sejam visualmente inspeccionados antes de cada utilização e retirados de serviço se se observarem defeitos;
- todos os assentos sejam lavados de acordo com as instruções do fabricante;
- todos os assentos e gruas sejam inspeccionados por um técnico competente com uma periodicidade mínima de seis meses.

Todos os incidentes ou quase incidentes relacionados com a utilização de dispositivos médicos devem ser comunicados ao INFARMED. Para tal poderá utilizar o modelo disponível em www.infarmed.pt/pt/vigilancia/prod_saude/profissionais_saude/index.html

O Conselho Directivo

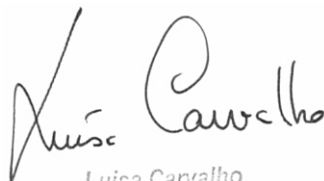

Luísa Carvalho
Vice-Presidente do
Conselho Directivo