

N.º 140/CD
Data: 16/08/2007

Assunto: **Recomendações de manutenção de cabos e adaptadores de desfibrilhadores externos.**

Para: Profissionais de saúde e técnicos de emergência médica.

Contacto no INFARMED: **Departamento de Vigilância de Produtos de Saúde**
(Tel: 217987145; Fax: 217987367; email: dvps@infarmed.pt)


O INFARMED foi informado, através da autoridade competente dos Estados Unidos (FDA), da ocorrência de avarias em desfibrilhadores externos, principalmente nos de tipo “mãos livres” (com eléctrodos adesivos) devido a problemas nos cabos e seus adaptadores. Estas avarias requereram a utilização de outros cabos/pás para se efectuar a desfibrilhação dos doentes.

Assim, o INFARMED recomenda:

- realizar testes funcionais ao desfibrilhador de acordo com o recomendado pelo fabricante;
- testar o sistema desfibrilhador, incluindo o cabo de interface, com uma carga externa;
- testar o desfibrilhador pelo menos todos os seis meses para garantir que fornece o nível máximo de energia que poderá ser utilizado em doentes;
- testar a funcionalidade dos cabos e posicioná-los de modo a serem facilmente alcançados pelos utilizadores para evitar que sejam sujeitos a esforços que os podem danificar;
- fornecer treino adequado a todos os utilizadores incluindo a verificação do mostrador e/ou o reconhecimento do som tipo “clic” que confirma que as ligações estão bem estabelecidas;
- utilizar a versão mais actualizada das instruções de utilização, incluindo listas de verificação sugeridas pelo fabricante, de cada desfibrilhador durante os procedimentos de teste e manutenção;
- indicar os contactos telefónicos de apoio técnico ou emergência do fabricante junto ao desfibrilhador.

Todos os incidentes ou quase incidentes relacionados com a utilização de dispositivos médicos devem ser comunicados ao INFARMED. Para tal poderá utilizar o [modelo disponível](#)

O Conselho Directivo


Luisa Carvalho
Vice-Presidente do
Conselho Directivo