

N.º 055/CD  
Data: 31/03/2011

Assunto: **Desfibriladores cardioLife TEC-7621K, TEC-7631K, TEC-7721K e TEC-7731K**

Para: Profissionais de saúde


Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt)

Os desfibriladores cardioLife TEC-7621K e TEC-7631K, com as versões de software 03-09 ou inferiores, e TEC-7721K e TEC-7731K, com as versões de software 02-09 ou inferiores, contendo o módulo opcional integrado de pressão arterial não invasiva CY-0010 ou SG-761VK e utilizados no modo de operação neonatal, apresentam um erro na função de alarme para a pressão arterial não invasiva. Por este motivo, o alarme é activado para valores limite fixos independentemente dos valores limite pretendidos.

Para correcção deste problema, o fabricante (Nihon kohden) está a proceder a uma actualização de *software*.

Atendendo à necessidade desta acção correctiva, o Infarmed recomenda aos utilizadores destes dispositivos que contactem o actual distribuidor (NKM, Unipessoal Ida) para receberem o aviso de segurança e a actualização do *software*.

O Conselho Directivo

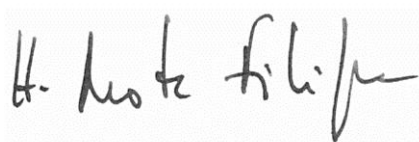

Helder Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Directivo