

N.º 067/CD
Data: 18/04/2011

Assunto: **Desfibrilhador/Monitor PIC 50 da Welch Allyn**

Para: Profissionais de saúde

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt

O **PIC 50** é um sistema portátil de cuidados intensivos que incorpora um monitor de ECG, um desfibrilhador (manual e semiautomático), um estimulador cardíaco (*pacemaker*) externo, um oxímetro de pulso e monitorização da respiração e da pressão arterial (não invasivo).

A **Welch Allyn**, fabricante do dispositivo **PIC 50**, informou o Infarmed do risco de falha ou mau funcionamento do ecrã que podem impedir a visualização dos sinais vitais do doente, o que, por sua vez, pode levar ao atraso ou falha da desfibrilhação.

O mau funcionamento é provocado por um deslocamento parcial ou total do cabo que liga o ecrã à placa de circuito. Todos os **PIC 50** podem ser afectados.

Para detectar o mau funcionamento deste dispositivo, o fabricante recomenda que sejam seguidas as instruções de utilização, em particular as respeitantes às verificações de rotina diárias e de mudança de turno.


Todos os dispositivos **PIC 50** que apresentem problemas devem ser enviados para reparação.

Atendendo a que não foi possível localizar todos os dispositivos afectados, o Infarmed recomenda aos utilizadores destes dispositivos que contactem o seu distribuidor, caso não tenham recebido o aviso de segurança.

Informações adicionais podem ser consultadas em:

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MONITORIZACAO_DO_MERCADO/VIGILANCIA_DE_DISPOSITIVOS_MEDICOS/VigilanciaDM_AVISOS/2010/aviso_seguranca_Welch%20Allyn_Dez.pdf.

O Conselho Directivo

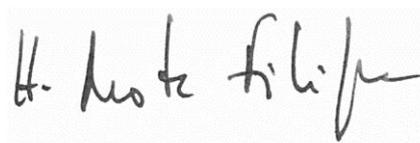

Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Directivo