

N.º 227/CD
Data: 07/11/2011

Assunto: **Monitor de Sinais Vitais VSM300 da Welch Allyn**

Para: Profissionais de saúde

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt

O **VSM300** é um sistema que se destina a ser utilizado por médicos qualificados para a monitorização não invasiva da pressão sanguínea, pulsação, temperatura corporal e saturação sanguínea de oxigénio (SpO₂) de pacientes adultos, pediátricos e neo-natais.


A **Welch Allyn**, fabricante do dispositivo **VSM300**, informou o Infarmed do risco de perda do alarme sonoro. O alarme visual continua a funcionar conforme previsto. Nenhuma outra função do dispositivo é afectada pela perda dos tons audíveis.

O mau funcionamento é devido a danos nas ligações eléctricas entre a bobina do altifalante e o terminal de sinal.

Para detectar o mau funcionamento deste dispositivo, o fabricante recomenda que os utilizadores verifiquem regularmente se o alarme sonoro está a funcionar. Todos os dispositivos **VSM300** que apresentem problemas devem ser enviados para reparação.

Atendendo a que não foi possível localizar todos os dispositivos afectados, o Infarmed recomenda aos utilizadores destes dispositivos que contactem o seu distribuidor, caso não tenham recebido o aviso de segurança, bem como o novo manual com as instruções de utilização.

O Conselho Directivo

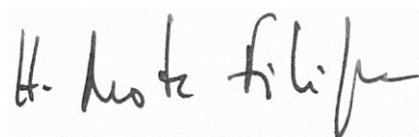

Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Directivo