

N.º 105/CD  
Data: 14/05/2012

Assunto: **Zaragatoas com extremidade em espuma**

Para: Profissionais de saúde

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt)


O Infarmed teve conhecimento da ocorrência, no Reino Unido, de um incidente grave, devido à separação da extremidade em espuma de uma zaragatoa, durante a prestação de cuidados de saúde na cavidade oral de um paciente idoso.



Atendendo a que existe o risco de asfixia, o Infarmed recomenda:

- Verificar, antes do uso, se a extremidade de espuma se encontra bem fixa à vareta;
- Não deixar a zaragatoa imersa em líquido antes da sua utilização, uma vez que tal poderá afetar a estabilidade da extremidade de espuma. Se necessário, humedecer a zaragatoa imediatamente antes do seu uso;
- No caso de o paciente poder morder a zaragatoa, considerar alternativas à sua utilização, como o uso de uma escova de dentes de cerdas suaves.

O Conselho Diretivo

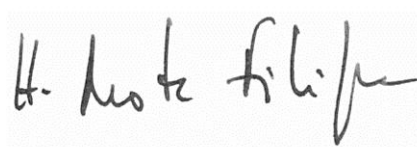

Helder Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Diretivo

