

N.º 135/CD  
Data: 14/06/2012

Assunto: **Berços/camas pediátricas articuladas de uso hospitalar**

Para: Hospitais/Instituições de saúde

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt)

O Infarmed recebeu uma notificação reportando um incidente ocorrido durante a utilização de um berço articulado, no qual a criança ficou presa entre a base da cama e a cabeceira quando a base da cama estava na posição elevada.


Verificou-se que quando a cabeceira ou os pés da cama (manual ou elétrica) se encontram elevados, o espaço entre as duas estruturas (base-cabeceira ou base-pés) permite a passagem do corpo da criança, mas não da cabeça, pelo que pode haver risco de estrangulamento.

O Infarmed encontra-se a promover, junto dos fabricantes/distribuidores de berços/camas pediátricas articuladas, a adoção de medidas de minimização do risco na conceção destes dispositivos médicos, de modo a evitar a ocorrência deste tipo de incidentes.

Assim, como medida imediata, o Infarmed recomenda que:

- o mecanismo de elevação das cabeceiras/pés dos berços/camas pediátricos articulados apenas seja utilizado quando necessário;
- o espaço entre a base-cabeceira ou base-pés dos berços/camas pediátricos articulados seja verificado sempre que se utilizar o mecanismo de elevação para impedir a passagem do corpo da criança.

O Conselho Diretivo

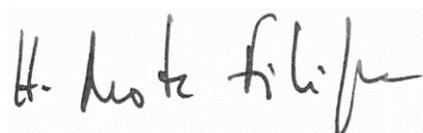

Helder Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Diretivo