

Circular Informativa

N.º 163/CD/8.1.7

Data: 10/07/2013

Assunto: **Módulos de bateria para utilização com os sistemas de ventilação SERVO-i da MAQUET**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Alguns módulos de bateria para utilização com os **sistemas de ventilação SERVO-i** da **Maquet**, com os códigos de data de fabrico entre 1005 e 1243 (1 de fevereiro de 2010 e 25 de outubro de 2012) que são frequentemente carregados/descarregados (por exemplo, para transporte) apresentam um tempo de vida útil inferior ao esperado.

Para corrigir esta situação, o fabricante **Maquet** implementou as seguintes medidas:

- Fornecimento de um módulo de bateria adicional;
- Substituição imediata dos módulos de bateria com os quais surja a mensagem “substituir bateria” antes do fim da data de validade;

Adicionalmente, o fabricante recomenda que:

- Se volte a ligar o ventilador à rede elétrica ou se acrescentem módulos de bateria adicionais totalmente carregados sempre que surja o alarme de “baixa tensão da bateria”;
- Os utilizadores se certifiquem que estão sempre instalados pelo menos dois módulos de bateria totalmente carregados e que, junto ao ventilador, existe equipamento de reanimação.

Em Portugal, não foi notificado ao Infarmed qualquer incidente relacionado com esta situação.

Contudo, atendendo a que não foi possível localizar todos os dispositivos afetados, o Infarmed recomenda aos utilizadores que não tenham recebido o aviso de segurança, o contacto com a empresa **Maquet Portugal, Lda.** (214 189 815; 214 171 275), entidade que coordena a ação corretiva em Portugal.

O Conselho Diretivo


Eurico Castro Alves
Presidente do
Conselho Diretivo