

Anexo 2


Procedimento de Inspeção às Cassetes do Sistema ORTHO BioVue®

Etapa	Ação
1.	Antes de utilizar, realize uma inspeção visual aos lotes afetados das Cassetes do Sistema ORTHO BioVue®. (Consulte o documento CL13-238_ Produtos afetados)
2.	Posicione a cassette para que a <i>Marca de Orientação</i> esteja localizada do seu lado direito.
3.	<ul style="list-style-type: none"> Se o <i>Nome do Reagente/ Cassete</i> está virado para si, como mostra a Figura 1a, é aceitável utilizar a cassette para teste. Se o <i>código de barras</i> está virado para si, como mostra a Figura 2b, não utilize a cassette.
4.	Não utilize as Cassetes do Sistema ORTHO BioVue® com o rótulo incorretamente posicionado (Figura 2b). Contacte o seu representante de Serviço Técnico para Clientes através do número 800 83 31 43 para reportar o problema e pedir assistência.

Posição Correcta do Rótulo

(Vista de Frente - Figura 1a)

(Vista de Trás - Figura 1b)

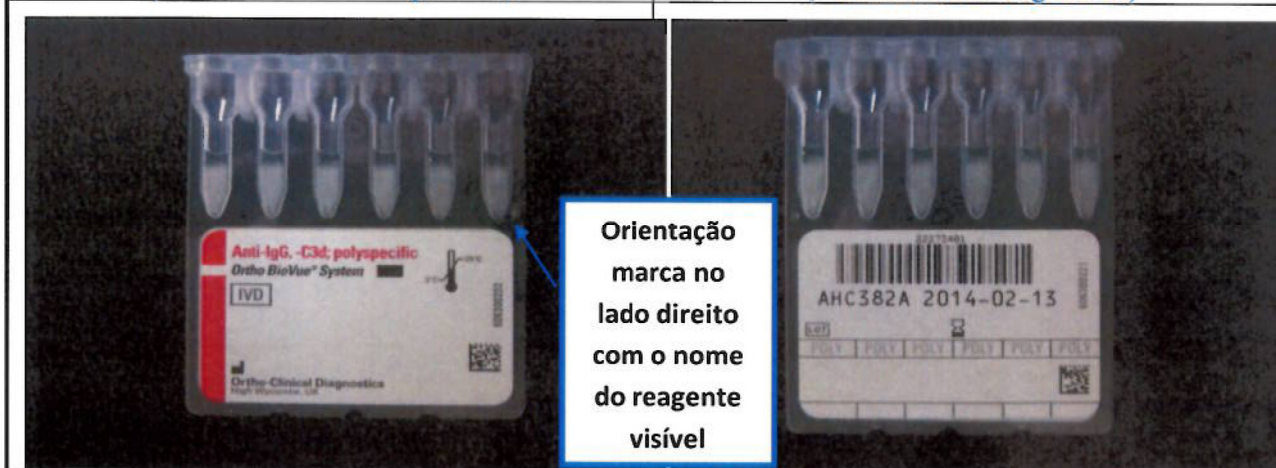

Posição Incorrecta do Rótulo

(Vista de Frente - Figura 2a)

(Vista de Trás - Figura 2b)

