

Circular Informativa

N.º 102/CD/8.1.7.

Data: 16/04/2014

Assunto: **Bombas de Insulina Paradigm**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Por se ter verificado que alguns utilizadores programaram acidentalmente a **bomba de insulina Paradigm** para debitar a quantidade máxima de bólus, o fabricante **Medtronic** está a reforçar a informação necessária para a utilização segura das bombas de insulina.

Esta informação aplica-se aos modelos MMT-511, MMT-512, MMT-515, MMT-522, MMT-522K, MMT-523, MMT-523K, MMT-554, MMT-712, MMT-712E, MMT-715, MMT-722, MMT-722K, MMT-723, MMT-723K e MMT-754.

Assim, o Infarmed recomenda que sejam seguidas as instruções de utilização do fabricante Medtronic, nomeadamente:

Profissionais de saúde

- Devem certificar-se que os limites de segurança de Bólus Máx. e Basal Máx. das bombas estão programados de acordo com as necessidades individuais de insulina dos seus doentes.

Doentes

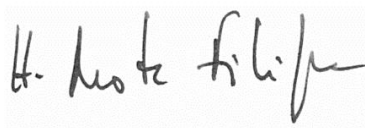
- Quando programarem as doses de insulina através do Menu Principal, devem ter muita atenção pois ao premir o botão de seta para baixo é possível que a dose exibida no visor varie entre 0,0 unidades e a dose máxima de insulina programada.
- Antes de premirem ACT para iniciar a administração, devem confirmar que a dose de insulina exibida no visor a piscar é a correcta.
- Devem certificar-se que as definições para o Bolus Máx. e Basal Máx. estão programadas conforme as necessidades individuais de insulina, de acordo com as instruções do médico assistente.

Em Portugal, não foi notificado qualquer incidente relacionado com esta situação.

O Infarmed recomenda ainda aos utilizadores o contacto com o médico assistente ou com a empresa **Medtronic Portugal, Lda.** (telefone: 808200555) para esclarecimento de qualquer dúvida.

Quaisquer incidentes ou outros problemas relacionados com estes dispositivos devem ser reportados à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed através do e-mail dvps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo


Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Diretivo