

Circular Informativa

N.º 150/CD/8.1.7.

Data: 27/06/2012

Assunto: **Contrafação de Clips de Laqueação Ligaclip® Extra Ligating Clip Cartridges (LT300) do fabricante Ethicon Endo-Surgery, LLC**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Na sequência de ter sido detetada, no mercado norte-americano, a existência de **Clips de Laqueação contrafeitos**, do fabricante **Ethicon Endo-Surgery, LLC** e uma vez que esta marca de dispositivos é distribuída em Portugal pela empresa Johnson & Johnson, Lda., o Infarmed alerta para as diferenças identificadas entre os dois produtos, tal como descritas pelo fabricante:

	Clips de Laqueação Ligaclip® Extra Ligating Clip Cartridges (LT300) Original	Clips de Laqueação Ligaclip® Extra Ligating Clip Cartridges (LT300) Contrafeito
Embalagem de unidades de venda	<u>Não</u> é envolvida em celofane.	É envolvida em celofane.
	<p>A referência à designação Johnson & Johnson Company é feita de forma clara e na sua fonte tradicional:</p> 	<p>A referência à designação Johnson & Johnson Company é feita num tipo de letra que não é o usual e o nome é apresentado de forma distorcida:</p> 


Embalagem Individual de Clips	<p>O método de esterilização encontra-se corretamente identificado como "STERILE", de acordo com a simbologia harmonizada:</p>  <p>ETHICON ENDO-SURGERY, LLC 1 LIGACLIP® EXTRA Ligating Clip Cartridge CE 0123 6 Medium/Large Titanium Clips/Cartridge ETHICON ENDO-SURGERY, LLC Guaynabo, Puerto Rico 00969 USA ©EES, LLC 2007 Made in USA A94321P01 REF LT300 STERILE R Rx Only Medium/Large</p>	<p>O método de esterilização encontra-se identificado como "STEMIKE" não como "STERILE":</p>  <p>ETHICON ENDO-SURGERY, INC 1 LIGACLIP® EXTRA Ligating Clip Cartridge CE 0123 6 Medium/Large Titanium Clips/Cartridge ETHICON ENDO-SURGERY, INC Cincinnati, OH 45242-2839 USA © ETHICON ENDO-SURGERY, INC. 1997 Made in USA A94321P01 REF LT300 STEMIKE R Rx Only Medium/Large LOT G4T54G 2015-04</p>
-------------------------------	---	--

Face ao exposto, o Infarmed informa o seguinte:

- Até à data, não existe evidência da comercialização dos produtos contrafeitos no mercado português.
- Atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, os profissionais de saúde que detetem a existência dos referidos agrafadores contrafeitos, não os utilizem e informem a Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

Conforme habitual, o Infarmed continuará a acompanhar e a divulgar todas as informações pertinentes relativas a esta matéria.

O Conselho Diretivo

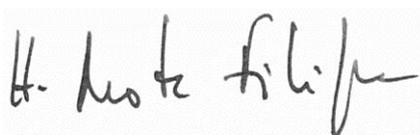

Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Diretivo