

Circular Informativa

N.º 002/CD/550.20.001

Data: 12/01/2016

Assunto: **Bomba de seringa Alaris - compatibilidade com seringas Nipro**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

O fabricante **Carefusion** informou que as **bombas de seringa Alaris** CC, GH, GS, PK e TIVA deixaram de ser compatíveis com as seringas da marca Nipro.

Por esta razão, a utilização de seringas Nipro nas bombas de seringa Alaris pode ter as seguintes consequências:

- Incapacidade de programar e iniciar uma perfusão;
- Atraso no início da próxima perfusão;
- Ar na linha, o que resulta numa interrupção inesperada da perfusão para remover o ar;
- Subperfusão.


Na sequência da utilização de bombas Alaris com seringas Nipro, o fabricante recebeu duas notificações de problemas de desempenho, mas nenhuma notificação de resultados clínicos indesejados.

O fabricante Carefusion está a alertar todos os utilizadores para não utilizarem as bombas Alaris com estas seringas e irá alterar as instruções de utilização para retirar a referência Nipro da lista de seringas compatíveis.

Dado que não foi possível localizar todos os utilizadores que utilizam bombas Alaris em Portugal, o Infarmed recomenda aos utilizadores destas bombas que tenham em conta a presente informação.

Esta informação foi também divulgada através de um aviso de segurança, pelo que os utilizadores que não o receberam devem entrar em contacto com o distribuidor - Clinifar (tel. 229825400).

O Conselho Diretivo

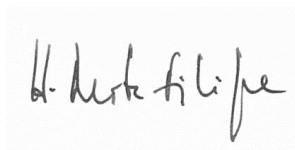

Vogal do Conselho Diretivo

1/1