




**1** Enlever l'opercule du tube de diluant pré-rempli et le poser sur le portoir intégré à la boîte.  
Remove the seal from the pre-filled diluent tube and place it on the holder integrated into the box.  
Die Deckelkappe vom Röhrchen mit dem Verdünnungsmittel nehmen und es in die auf der Schachtel vorgeformte Halterung einsetzen.  
Verwijder de dop van de voorgevulde buisje met verdunningsmiddel en plaats deze op het in de doos ingebouwd rekje.  
Rimuovere il sigillo dalla provetta del reagente preriempita e inserirla nel portaprovette collocato sulla scatola.  
Retire el sello laminado del tubo de diluyente prellenado y colóquelo en el soporte integrado en la caja.  
Retire o selo vedante do tubo que já tem o diluente e coloque-o no suporte integrado na caixa.

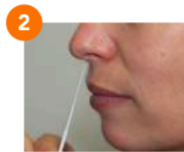

**2** Réaliser le prélèvement dans les 2 narines avec le même écouvillon.  
Collect the samples from both nostrils, using the same swab.  
Die Entnahme in den 2 Nasenlöchern mit demselben Wattestäbchen durchführen.  
Verzamel monsters uit beide neusgaten met hetzelfde wattenstaafje.  
Esegui il prelievo in entrambe le narici utilizzando lo stesso tampone.  
Tome la muestra en ambas fosas nasales con el mismo hisopo.  
Recolha as amostras em ambas as narinas, usando a mesma zaragatoa.



**3** Décharger l'écouvillon dans le tube puis extraire le maximum de liquide.  
Deposit the swab into the tube and extract as much liquid as possible.  
Das Wattestäbchen im Röhrchen entleeren und Restflüssigkeit vom Stäbchen abstreifen.  
Doe het wattenstaafje in de buis en haal er zoveel mogelijk vloeistof uit.  
Svučate il tampone nella provetta, quindi estrarre quanto più liquido possibile.  
Descargue el hisopo en el tubo y luego extraiga la mayor cantidad de líquido posible.  
Deposite a zaragatoa no tubo e extraia o máximo de líquido possível.



**4** Mettre la tétine compte-goutte et déposer 4 gouttes dans le puits de la cassette. Lire le résultat à 15 minutes.  
Attach the dropper test to the tube and use the dropper to add 4 drops into the well in the cassette. Read the results after 15 minutes.  
Den Tropfenzähler einsetzen und 4 Tropfen in die Öffnung der Kassette einträufeln lassen. Nach 15 Minuten das Ergebnis ablesen.  
Bevestig de druppelaarpijp erop en doe 4 druppels in de cassette. Lees het resultaat na 15 minuten.  
Inserire il tappo contagocce e aggiungere 4 gocce nel pozzetto della cassetta. Leggere il risultato dopo 15 minuti.  
Coloque la tefina cuantagotas y deposite 4 gotas en el orificio del cassette. Lea el resultado a los 15 minutos.  
Fixe o conta-gotas no tubo e deite 4 gotas no orificio da cassette. Leia os resultados após 15 minutos.

Lire la notice avant de procéder au test.  
Read the notice before carrying out the test.  
Vor der Durchführung des Tests bitte die Packungsbeilage lesen.  
Lees de handleiding voordat u verdergaat met de test.  
Leggere il foglietto illustrativo prima di eseguire il test.  
Lea el prospecto antes de realizar el test.  
Leia o folheto antes de realizar o teste.

TEST DESTINÉ À L'AUTODIAGNOSTIC / TEST FOR SELF-DIAGNOSIS / SELBSTDIAGNOSETEST / TEST VOOR ZELFDIAGNOSE / TEST DESTINATO ALL'AUTODIAGNOSI / TEST DESTINADO AL AUTODIAGNÓSTICO / TESTE PARA AUTODIAGNÓSTICO

# BIO SYNEX

**Appuyer sur la croix pour insérer le tube.**  
Press on the cross to insert the tube.  
Auf das Kreuz drücken um das Röhrchen einzusetzen.  
Druk op het kruisje om het buisje erin te steken.  
Premere sulla X per inserire la provetta.  
Presione la cruz para insertar el tubo.  
Pressionar em cima da cruz para inserir o tubo.



## COVID-19 Ag BSS self-test

**Autotest antigénique COVID-19 Ag : détection des antigènes du SARS-CoV-2**  
**COVID-19 Ag Antigenic Self-testing Kit: detection of SARS-CoV-2 antigens**  
**Antigen-Selbsttest COVID-19 Ag: Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen**  
**Autoteste antigénico COVID-19 Ag: deteção de antígenos do SARS-CoV-2**

**Autotestez-vous !  
Test yourself!  
Testen Sie sich selbst!  
Teste-se pessoalmente!**



### 5 TESTS / TESTES

**BIOSYNEX SWISS SA**  
Rue de Romont  
29-31 CH-1700 FRIBOURG  
SUISSE

**SERVICE CONSOMMATEURS  
CONSUMER DEPARTMENT**  
+33 3 88 78 85 24  
[www.biosynex.com](http://www.biosynex.com)  
[client@biosynex.com](mailto:client@biosynex.com)

**FR Facile :** à partir d'un prélèvement nasal.  
**Rapide :** résultat en 15 minutes.  
**Fiable :** 97,2 % de sensibilité et 100 % de spécificité.

**EN Easy:** it just requires a simple nasal swab.  
**Rapid:** results in just 15 minutes.  
**Reliable:** 97.2% sensibility and 100% specificity.

**DE Einfach:** durch Nasenabstrich.  
**Schnell:** Nach 15 Minuten haben Sie das Ergebnis.  
**Zuverlässig:** 97,2 % Empfindlichkeit und 100 % Spezifität.

**NL Eenvoudig:** met een simpel neusuitstrijkje.  
**Snel:** uitslag na 15 minuten.  
**Betrouwbaar:** 97,2% gevoeligheid en 100% specificiteit.

**IT Facile:** basta un semplice prelievo nasale.  
**Rapido:** risultato in 15 minuti.  
**Affidabile:** 97,2% di sensibilità e 100% di specificità.

**ES Fácil:** a partir de una muestra de hisopado nasal.  
**Rápido:** resultado en 15 minutos.  
**Fiable:** 97,2 % de sensibilidad y 100 % de especificidad.

**PT Fácil :** a partir de uma amostra nasal.  
**Rápido :** resultado em 15 minutos.  
**Fível :** 97,2% de sensibilidade e 100% de especificidade

DIE PRODUKTE DÜRFEN GEMÄß § 11 ABS. 1 MPG BEFRISTET IN DEUTSCHLAND ERSTMALIG IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN. SONDERZULASSUNGSNUMMER: 5640-S-041/21

AUTOTESTE COVID-19 - REGIME EXCEPCIONAL



# BIO SYNEX

**Appuyer sur la croix pour insérer le tube.**  
Press on the cross to insert the tube.  
Auf das Kreuz drücken um das Röhrchen einzusetzen.  
Druk op het kruisje om het buisje erin te steken.  
Premere sulla X per inserire la provetta.  
Presione la cruz para insertar el tubo.  
Pressionar em cima da cruz para inserir o tubo.



## COVID-19 Ag BSS self-test

**COVID-19 Ag antigeen zelftest: opsporing van CoV-2 SARS-antigenen**  
**Autotest antigenico COVID-19 Ag: rilevazione degli antigeni del SARS-CoV-2**  
**Autotest antigénico de COVID-19 Ag: detección de antígenos del SARS-CoV-2**

**Test uzelf!  
Fate il test da soli!  
¡Haga un autotest!**

### 5 TESTS



**BIOSYNEX**  
COVID-19 Ag BSS self-test

